

5g×12包


 ヨシダ製薬

1ステップで除菌&amp;洗浄

環境除菌・洗浄剤

ルビスタ®

パウダー 5g


 ヨシダ製薬

1ステップで除菌&amp;洗浄

環境除菌・洗浄剤

ルビスタ®

パウダー 5g

5g×12包

 製造元:  
 キョーリン製薬グループ工場株式会社  
 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

 発売元:  
 杏林製薬株式会社  
 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

 販売元:  
 吉田製薬株式会社  
 東京都千代田区中央5丁目1番地10号

 使用前に必ず使用方法、用途及び  
 注意事項をよく読んでください

使用上の注意

-  小児の手の届くところに保管しない
  飲むくすりはありません

●用途以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●擦って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。医師の指示がない限り無理に吐かせないでください。意識のある場合には、十分な水を飲ませ、意識の無い場合には何も与えないでください。●目に入った場合には速やかに水で洗い流してください。その後、速やかに医師の診察を受けてください。●調製液が肌についた場合には、速やかに十分な水で洗い流してください。●本品、調製液との接触により、手荒れ・発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。

危険



皮膚刺激、重篤な眼の損傷/水生生物に毒性

保管および取扱い上の注意

●本品は、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。●清潔な容器を使って調製してください。●使い終わった容器、ワイプ等は、お住まいの地域の規定に従って廃棄してください。

 【製品問合せ窓口】 吉田製薬株式会社 03-3381-2004  
 受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)

 外箱 紙・PE、金属、PET  
 21vrY1

ここから開封してください

品名

●環境除菌・洗浄剤 ルビスタ パウダー5g

用途

●よく手が触れる環境表面※、医療機器の外装表面の除菌洗浄に  
 環境表面の例  
 ※ドアノブ、手すり、机、家具、スイッチ類、便器・便座、水栓レバー、蛇口、床等

使用方法

●本品1包(5g)に対して水道水500mL(500g)で溶かし、1%(w/v)の調製液を作製してください。調製液はピンク色を呈します。なお、溶けにくい場合は、ぬるま湯をご使用ください。●調製液は、調製後約7日間ご使用いただけます。溶液が透明になったら新しく調製してください。●調製液は、直射日光を避け、常温で保管してください。●環境清拭用ルビスタワイプに調製液を浸してご使用ください。

「使用方法」に関する注意

●定められた「使用方法」を厳守してください。●本品及び調製液を飲み込まないようにしてください。●手袋(ゴム・プラスチック等)を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●医療機器の性能や機能に影響が出る可能性のある部分には使用しないでください。また、医療機器の内部に調製液が染み込まないようにご注意ください。●大理石、銅、亜鉛、軟鋼などは、劣化する場合がありますので使用しないでください。●清拭する材質によっては着色又は変色・劣化する場合があります。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。

成分

●酸化剤(ペルオキソ-硫酸水素カリウム)  
 ●界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)  
 ●添加物:着色料、香料 ●液性:酸性

製造番号

使用期限

【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004

受付時間 9:00～17:00(月～金 ※土日祝日除く)

製造元: キョーリン製薬グループ工場株式会社

発売元: 杏林製薬株式会社

販売元: 吉田製薬株式会社

どこからでも開封できます

環境除菌・洗浄剤

ルピスタ®

パウダー 5g

成分



ヨシダ製薬

- 酸化剤(ペルオキソ-硫酸水素カリウム)
- 界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
- 添加物: 着色料、香料 ●液性: 酸性



注意: 飲めません

製造番号

使用期限

危険



注意:  
飲めません